

DERMATOLOGISCHE PRÄPARATE

→ Entnahme



Abklatschtechnik
Vor allem bei nässenden Hautveränderungen




Hautgeschabbel
Vor allem zum Nachweis von Parasiten



Feinnadelpunktionstechnik
Mit oder ohne Aspiration bei Pusteln oder Umfangsvermehrungen

→ Präparation

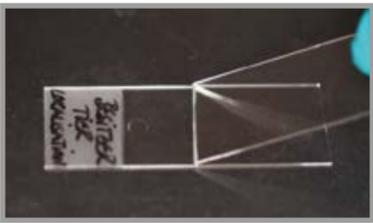

Ausstreichen




Lufttrocknen




Färben
Schnellfärbung: 5 x 1 Sek. in Fixier- und jede Färbelösung tauchen


→ Klinische und mikroskopische Befunde

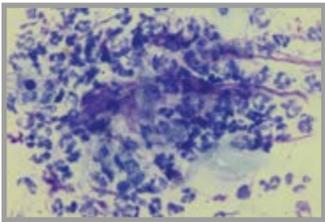

Pyodermie
Degenerierte neutrophile Granulozyten und kokkoide Bakterien

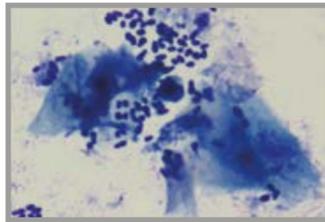


Malassezien-Dermatitis
Malassezien und Keratinschollen

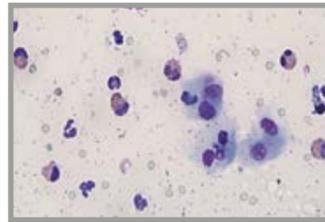

Eosinophile Plaque Katze
Eosinophile Granulozyten und Platteneithelzellen




Sarkoptes-Räude
Sarkoptes-Milbe

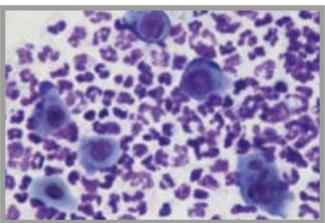


Pemphigus foliaceus
Akantholytische Zellen und neutrophile Granulozyten



Demodikose
Demodexmilben

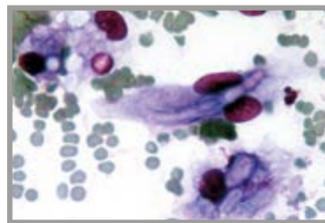

Dermatophytose
Pilzhypen

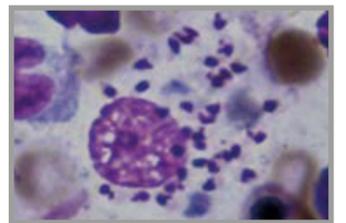

Kutane Leishmaniose
Makrophage mit Leishmanien

Stand: Januar 2024, Bildquelle: Laboklin

D Steubenstr. 4
97688 Bad Kissingen
Deutschland
Telefon +49 971 7 20 20
Fax +49 971 6 85 46
E-Mail info@laboklin.com
Internet www.laboklin.com

A Paul-Hahn-Str. 3 / D / 1
4020 Linz
Österreich
Telefon +43 732 717 24 20
Fax +43 732 717 322
E-Mail labor.linz@laboklin.com
Internet www.laboklin.com

CH Max Kämpf-Platz 1
Postfach, 4002 Basel
Schweiz
Telefon +41 61 319 60 60
Fax +41 61 319 60 65
E-Mail labor.basel@laboklin.ch
Internet www.laboklin.com