




HARNSEDIMENT

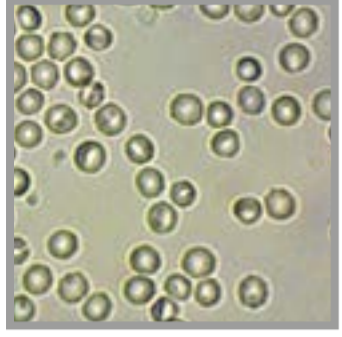

Erythrozyten

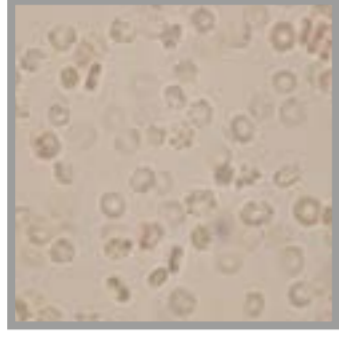

Erythrozyten –
Stechapfelform

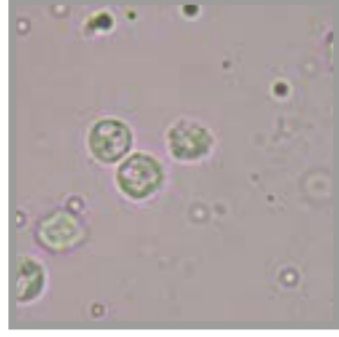


Leukozyten




Vorsichtiges Schwenken der
Harnprobe bei Raumtemperatur
bis der Bodensatz komplett
gelöst ist.




Calciumoxalate

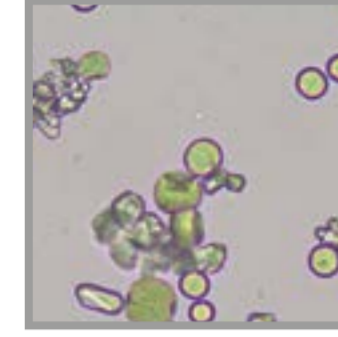

Calciumcarbonate

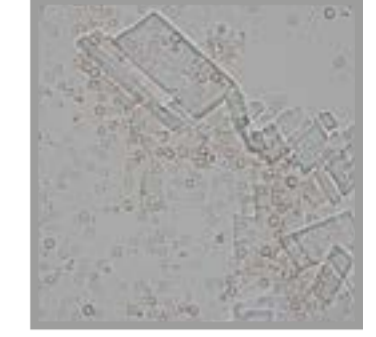

Cholesterinkristalle

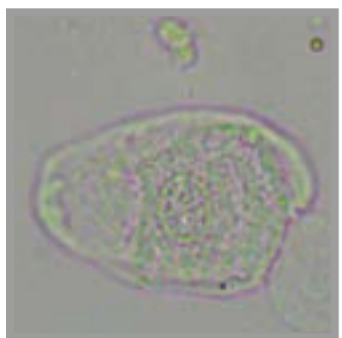


Plattenepithel



Übergangsepithelien




Epithelien, Leukozyten
und Bakterien

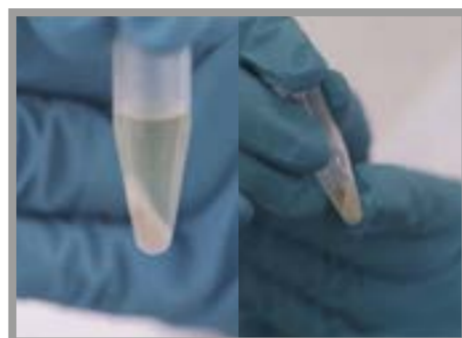

Dekantieren des Sediments
nach Zentrifugation der Harnprobe
bei 400 g für 5 Minuten.




Struvitkristalle

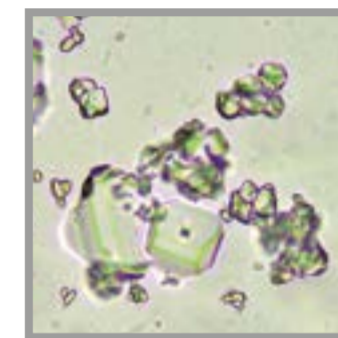


Struvitkristalle in
Auflösung




Ammoniumurate

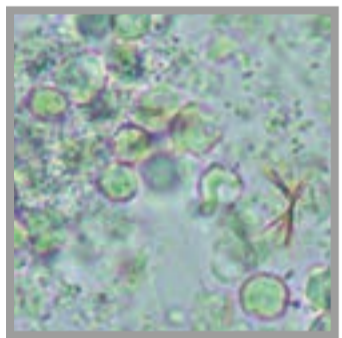

Leukozyten, Bakterien
und Bilirubinkristalle –
ungefärbt

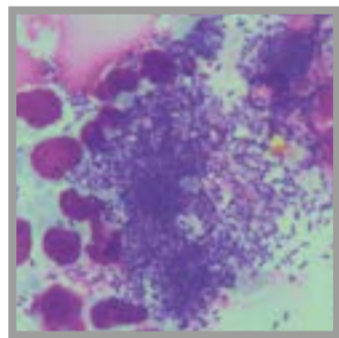

Leukozyten, Bakterien
und Bilirubinkristalle –
gefärbt

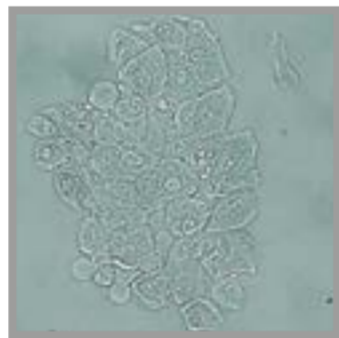


Epithelien in Verbänden
– ungefärbt



Vorsichtiges Resuspendieren
des Sediments & Auftragen von
ca. 25 µl des Sediments auf einen
beschrifteten Objektträger.




Bilirubinkristalle

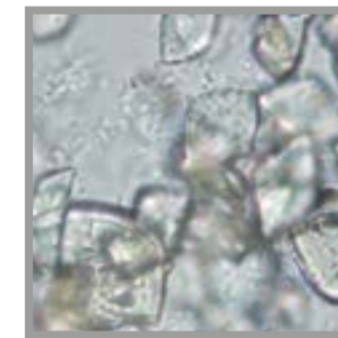

Harnsäurekristalle




Cystinkristalle

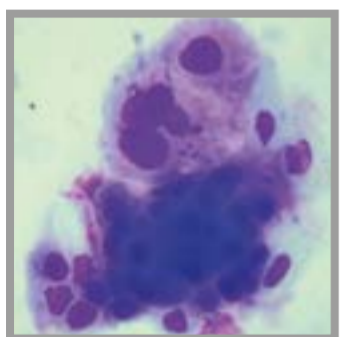

Epithelien in Verbänden
– gefärbt:
Blasenkarzinom




Granulierter Zylinder

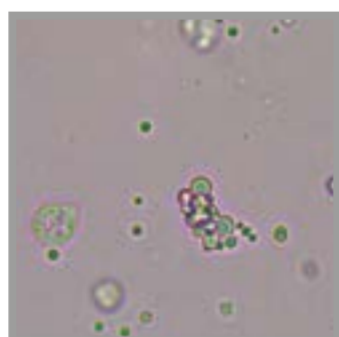


Leukozyt und
Fetttropfchen



Mikroskopieren nach definiertem
Schema bei 100-, 200-,
und 400-facher Vergrößerung.

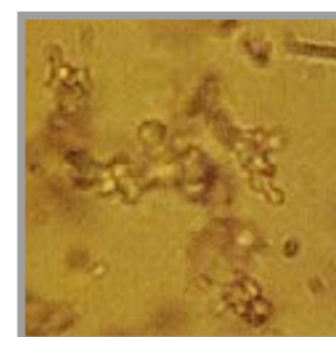

Xanthinkristalle

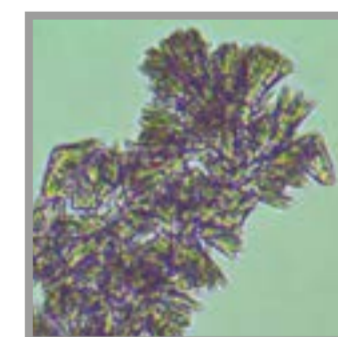

Nadelförmige Kristalle –
oft medikamenteninduziert



Wurmei (*Capillaria plica*)
Harnblasenhaarwurmei

BILDANALYSE - DER SCHNELLSTE WEG ZUM BEFUND!

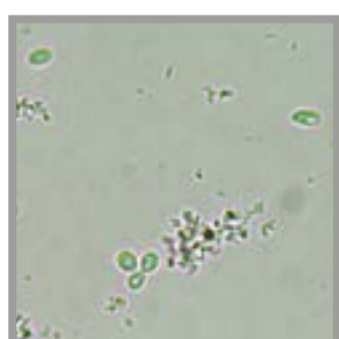


Bild und Fragestellung hochladen
app.laboklin.com

Befund meist noch am selben Tag
erhalten!




Spermien



Hefen und Bakterien



Pilzhyphen

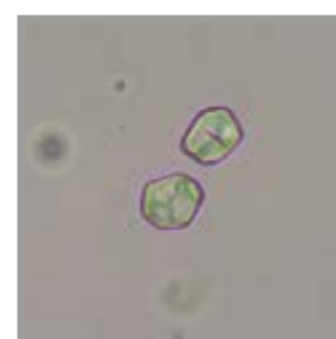

Stärkeköerner



Pollenköerner



Faser

Stand: Januar 2024, Bildquelle: Laboklin

D Steubenstr. 4
97688 Bad Kissingen
Deutschland
Telefon +49 971 7 20 20
Fax +49 971 6 85 46
E-Mail info@laboklin.com
Internet www.laboklin.com

A Paul-Hahn-Str. 3 / D / 1
4020 Linz
Österreich
Telefon +43 732 717 24 20
Fax +43 732 717 322
E-Mail labor.linz@laboklin.com
Internet www.laboklin.com

CH Max Kämpf-Platz 1
Postfach, 4002 Basel
Schweiz
Telefon +41 61 319 60 60
Fax +41 61 319 60 65
E-Mail labor.basel@laboklin.ch
Internet www.laboklin.com